

アースライト社 デラックス・アジャスタブル・ヘッドレスト ユーザーガイド

この度はアースライト社のデラックス・アジャスタブル・ヘッドレストをお買い上げ頂きありがとうございます。当社のデラックス・アジャスタブル・ヘッドレストはクライアントが心地よく施術を受けられるよう、アングルや高さを自由に設定することが出来ます。また、テーブルの裏に格納できるようになっておりますので移動も簡単です。ご意見やご質問などございましたらお近くの代理店までご連絡下さい。



<ヘッドレストの使用と格納方法>

ヘッドレストのプラットフォームは写真下のように小さく畳むことが出来ます(出荷時は畳まれた状態です)。レバー(赤丸)を外すことによってロックが外れ、ヘッドレストホールに差し込む接合棒が開きます。(＊使用初めはロックが硬いことがあります但品質には問題ございません。)ヘッドレストをご使用の際はテーブルのアウトレットホール(穴)にヘッドレストの接合棒を差し込み、レバーをロックすることでアングルを固定して下さい。レバーをロックする際は指を挟まないようお気をつけ下さい。



デラックス・アジャスタブル・ヘッドレストはアングルや高さを調節することにより更なる快適が得られるようデザインされております(写真右)。また、クッションは取り外しが出来ますので、ご希望の幅へ調整することも可能です。尚、テーブルの裏には滑り止めが付いておりますので、クライアントが頭をのせた時点で圧力がかかり外れないように工夫されております。ヘッドレストを外す際は軽く上に持ち上げるように引いて頂ければ簡単に外すことが出来ます。



ヘッドレストの高さは写真右の部分(赤丸)で調節されます。高さの調節をする場合には、下げた状態でご調節頂くか(写真中央下)、起こした状態でヘッドレストを押さえながらご調節下さい。尚、ロックをかけた状態では高さは調節できませんのでご注意下さい。



また、アースライト社のヘッドレストはテーブルの中に格納できるようデザインされております。クッションとプラットフォームを別々にし、テーブルの裏のナイロンテープに(クッションは柔らかいナイロンテープの部分に、プラットフォームは硬いナイロンテープの部分に)貼り付けて下さい(写真右)。

